



CRU SELECCION

Cemento de resina definitivo universal Relleno nano



Jeringa doble de 7gr.

PROBLEMA



Las caries de
cuello "saltan con
facilidad"



SOLUCIÓN

Se adhiere mejor al
cuello, y al composite

Los cementos en polvo y liquido
pueden tener problemas de dosis
y de mezcla



Automezcla perfecta y
rápida

Pérdida de tiempo hasta que
fragua



Fraguado 40 segundos
con luz y 4 minutos sin luz

Con la humedad (barrillo
dentinario) pueden despegarse



Hidrofílico, si hay
humedad se adhiere mas

Dual, si no llega la luz, fragua solo

**Fraguado anaerobico (sin presencia de oxígeno)
no se desperdicia la última capa**

Autograbante, sin adhesivo (grabar sólo el esmalte)

**Libera fluor
Radiopaco**

Sin bisfenol (bis gma)

Ausencia de sensibilidad

INCOMPATIBLE CON LOS PRODUCTOS QUE CONTIENEN BIS GMA



**DENTAL ARROYO
SELECCION**



Tel.: 91 711 45 08

www.arroyoseleccion.com

No usar adhesivo si hay retención adecuada



Ferulizaciones
Grabar esmalte
no abrasionado

No secar el diente,
contiene agua natural,
sólo removerla

Semipolimerizar uno
o dos segundos el
sobrante y quitar
con instrumento



Coronas y puentes capa
de 12 micras, no deja
coronas altas



Perno muñón colado



Puentes de maryland



Inlay / onlay



Mantenimiento de espacio



Refuerzo de puentes y prótesis



RECONSTRUCCIÓN DEL MUÑÓN.

Adhesión
química al
perno, esmalte
y dentina



Comportamiento
similar a la
dentina
natural

Para **todas** las superficies



Cerámica sobre Circonio



Circonio sobre metal

En circonio y cerámica, microabrasionar o grabar para crear mejor retención mecánica

PROTOCOLO PARA REPARAR CERÁMICA



- 1- Descartar que no sea un problema de oclusión
- 2- Asperizar la superficie para crear retenciones
- 3- Grabar con ácido fluorhídrico
- 4- Aplicar silano
- 5- Aplicar cement URC, al tener 12 micras de grosor, deja más espacio para el opaquer y el composite

Si se ha utilizado eugenol, quitar con ácido antes de poner otro producto

4 productos en 1

Cementar, reconstruir, reparar
cerámica y caries de cuello

<https://www.youtube.com/watch?v=uWq5hpQPvJ8&t=4s>

CRU SELECDENT



AHORA

